

# Perio Film<sup>®</sup>

Bakteriobójczy opatrunek  
adhezyjny w postaci filmu  
do zastosowania w stomatologii

**Ochrona oraz leczenie błony śluzowej przy:**

- drobnych skaleczeniach
- zabiegach chirurgicznych
- ranach chirurgicznych
- implantologii
- kieszonkach paradontalnych



# Perio Film<sup>®</sup>

## Bakteriobójczy opatrunek adhezyjny w postaci filmu do zastosowania w stomatologii

### Skład:

Proszek: sól sodowa piperacyliny 100%  
Płyn: kopolimer aminoalkilometakrylowy, kopolimer metakrylowy amonu, alkohol etylowy 95%, woda dejonizowana.

### Zawartość opakowania:

- 10 sterylnych strzykawk o pojemności 2,5 ml z igłami do iniekcji (jedenorazowego użytku)
- 10 sterylnych igieł (tępych)
- 3 fiołki 100 mg proszku piperacyliny
- 3 buteleczki 1 ml alkoholowego roztworu polimerycznych żywic akrylowych



CE 0373  
Trwałość 36 miesięcy

## Zastosowanie

**PerioFilm®** znajduje zastosowanie w uszkodzeniach i ranach błony śluzowej jamy ustnej jako ochrona przed infekcjami wtórnymi.

### **Ochrona ran i szwów chirurgicznych**

**PerioFilm®** tworzy błonę ochronną, która zapobiega wnikaniu bakterii, dzięki czemu obniża się niebezpieczeństwo zakażenia ran chirurgicznych. Ponadto uzyskuje się ochronę miejsc uciskających w ramach zabiegów protetycznych przed infekcją wtórną.

### **Ekstrakcje**


**PerioFilm®** stosujemy aby uniknąć infekcji i komplikacji po ekstrakcjach i innych zabiegach chirurgicznych. Możliwe jest jego nanoszenie za pomocą wchłanialnej gąbki.

### **Implantologia**

**PerioFilm®** można z powodzeniem stosować we wszystkich fazach zabiegów implantologicznych do zapobiegania infekcjom, także przy istniejącej periimplantitis.


### **Zapalenie przyzębia**

**PerioFilm®** nanosi się delikatnie do kieszonki dziąsłowej po usunięciu kamienia nazębnego i po kiretażu.

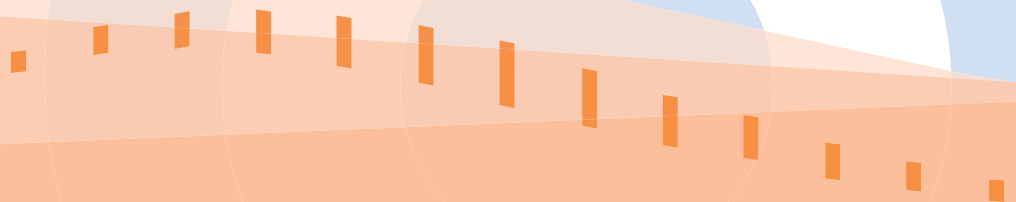


# Instrukcja użytkowania


# Perio Film<sup>®</sup>

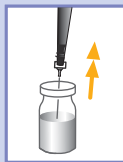


1 Aspirować cały roztwór za pomocą strzykawki z igłą.

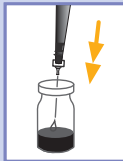


2 Wstrzyknąć roztwór do fiolki z proszkiem.

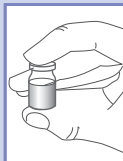


3 Wstrząsnąć fiolką do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

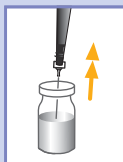


4 Naciągnąć potrzebną ilość roztworu.

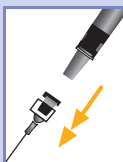

5 Zastąpić ostrą igłę tępą igłą do podawania roztworu.

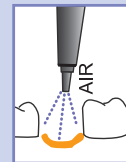

6 Aplikować roztwór adhezyjny na skaleczenia, rany, szwy, i inne uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej w celu ich ochrony, po wcześniejszym osuszeniu. W przypadku leczenia kieszonek periodontalnych należy je w całości wypełnić roztworem. Aby przyspieszyć odparowanie rozpuszczalnika i polepszyć przyleganie opatrunku można zastosować niewielki strumień powietrza w miejscu podania roztworu do kieszonki.

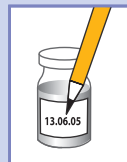

7 Zapisać datę zrobienia roztworu na fiolce.



8 Nieużywany roztwór, jeśli jest trzymany z dala od światła w temperaturze 4°C utrzymuje swoje właściwości przez 4 tygodnie.

Okres ważności preparatu nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego wynosi 3 lata.

#### Bibliografia:

- 1 „Clinical Evaluation of a new topical Antibiotic Gel in Dental Surgery” - G. Gambarini, V. Campanella, L. Testarelli - Università degli Studi "La Sapienza" Roma
- 2 „Clinical Efficacy of a topical Antibiotic in the Treatment of periodontal Diseases” - N. Zallocco, L. Testarelli, G. Gambarini - Università degli Studi "La Sapienza" Roma
- 3 „Clinical Evaluation of a new topical Antibiotic Gel in periodontal Diseases” - L. Lustrati, N. Zallocco, G. De Paolis, L. Testarelli, A. Quaranta - National Congress "Collegio del Docenti" Roma, April 2004
- 4 „Clinical Evaluation of a filmogenic Solution in Periodontology” - G. Gambarini - Università degli Studi "La Sapienza" Roma
- 5 „Evaluation of the topical Application of an Antibiotic on Patients with generalised aggressive Periodontitis” - V. Campanella, R. Ciavarrò, R. Addestri - Università degli Studi "La Sapienza" Roma
- 6 „Development and in-vitro Evaluation of a new filmy local Drug Delivery System for Periodontitis” - A. R. Bilia, V. Taglioli, G. Mazzi, F. F. Vincieri - University of Florence

Wwtwórca:

ITALMED - Florencja - Włochy

CE 0373



Dystrybutor w Polsce:

Molteni Stomat Sp. z o.o.

30-733, Kraków, ul. Obrońców Modlina 3

tel. +48(12) 653 25 85, fax. +48(12) 654 15 60

www.moltenistomat.pl; biuro@moltenistomat.pl